

体位変換器

ケープ ロンボ初期導入セット

TAISコード：00245-000103



■型番：RF1、RF3(×2)、RF5、RM1、RM2

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

■材質：

RF1、RF3、RF5：表側地/50%、ポリエステル50%、中身 ロンボフィル
RM1、RM2：表側地/50%、ポリエステル50%、中身 ロンボメッド

■ロンボフィル(スニベット)

身体の形状にぴったりフィットして、広い面をサポート。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンをひし型にカットし空気の流れをスムーズにしムレを軽減。

■ロンボメッド(スニベット+チップ)

ウレタンより少し硬めでへたりにくい特殊な形の発砲チップが、スニベットとスニベットの隙間を埋め、身体を安定させて保持。

■寸法：

RF1 (40×60cm)
RF3 (23×40cm)
RF5 (80×80cm)
RM1 (65×75cm)
RM2 (40×80cm、フラップ部20×80cm)

汎用性の高いビロー5種類(計6個)をセットに!

ケープ スネーククッション

TAISコード：00245-000102

■寸法：φ20×220cm



■型番：RM46200

レンタル料金	ご利用者負担額	
円/月	1割負担	円/月
	2割負担	円/月

1本で体位変換、30度側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。

介護保険
について

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売

介護保険
について

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売


体位変換器

モリトー 移座えもんシート

TAISコード：00229-000026

■寸法：全長 75cm 幅 75cm (7段階)

■材質：ナイロンタフタ

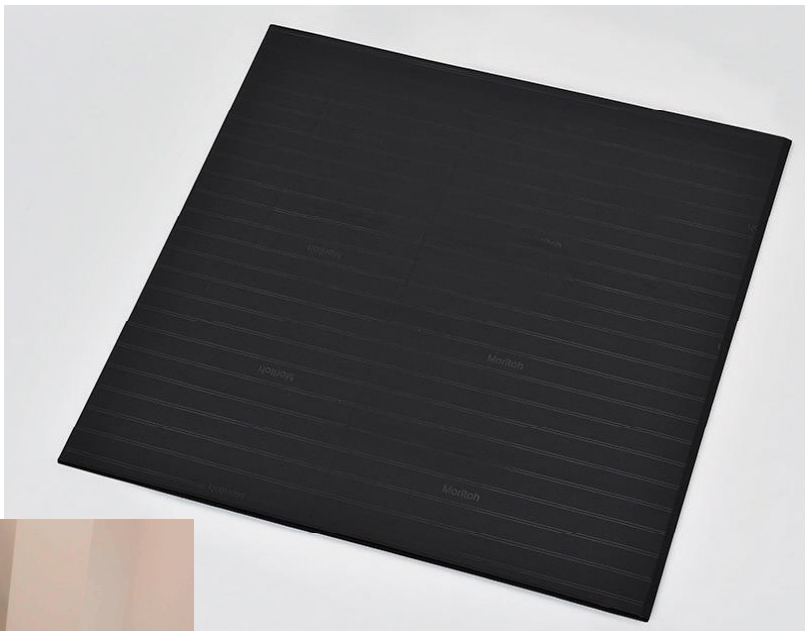

移座えもんシート BLACK

寝た状態での身体の上左右の移動が簡単に行えます。移動時の摩擦を軽減するので移動時の圧迫骨折等を防止できます。薄くて軽いので持ち運びに便利です。



移座えもんシート RED



ご本人の力で、腰を持ち上げ、足を突っ張ることで、頭方向に移動します。(足底が滑らないように滑り止めのシートを敷くと便利です) 脚力が少し弱くなった方には、ご本人の力を利用してながら臀部を軽く持ち上げ、頭方向に押し移動します。

ご本人の力を利用して頭側へ移動

ご自分で、足を突っ張ることが出来なくなってきた方には、移座えもんヒップベルトを使用します。移座えもんヒップベルトは、坐骨に掛け、腕を伸ばして、引いてください。特に体重の重い方や、マットが柔らかい時には、腰の部分にもう一枚シートを敷き、移座えもんベルトを使用してください。

横への移動と体位変換

介護者の反対側に体位変換します。シートを体の下にしっかり挿入します。体を元に戻し、方と腰を支えながら横移動させ、引き寄せます。



枕や体を支えながらシート下側を引いてください。特に、体重負荷の少ないところから引き抜く引き抜きやすくなります。

バスタオルを使用する場合は、タオルの下にシートを敷き、タオルを引けば容易に横移動できます。バスタオルを使用して、斜め上方向にゆっくり引き上げると、そのままの場所で寝返りを行うことができます。

横への移動と体位変換

腕を深く組んで、背中を丸くすると、シートが挿入しやすくなります。肩甲骨下部まで挿入できない時は、軽く肩を持ち上げ片側ずつ挿入してください。

横への移動と体位変換

■移座えもんシート RED

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

■移座えもんシート BLACK

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

体位変換器


アイ・ソネックス

ナーセントExロール、ナーセントExロールワイド

	TAISコード	寸法	重量
ナーセント Ex ロールワイド	: 00149-000037	700 × 800 × 50mm	1,900g
ナーセント Ex ロール 100	: 00149-000036	1000 × 240 × 70mm	900g
ナーセント Ex ロール 150	: 00149-000035	1500 × 240 × 70mm	1,350g
ナーセント Ex ロール 200	: 00149-000034	2000 × 240 × 70mm	1,800g

■材質:
カバー:ポリエステル70%、綿30%
クッション材:ポリエステル綿チップ

体位変換に便利なハンドル付き、オートクレープ132℃に対応。通気性と弾力を備えた特殊加工の綿チップが適度に動き、身体に沿わせて形状を変えることができます。

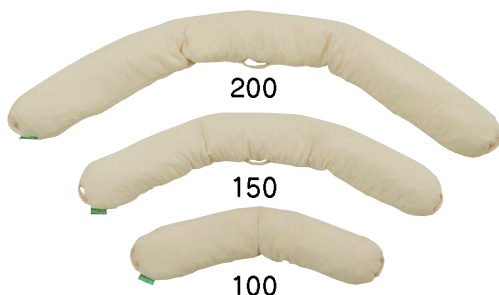

ワイド



■ナーセント Ex ロールワイド

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

■ナーセント Ex ロール 150

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

■ナーセント Ex ロール 100

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

■ナーセント Ex ロール 200

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

タカノ

移乗ボード“のせかえくん”

重量：1100 g

■型番：TB-502 TAISコード：00297-000045

■寸法：幅55cm×長さ172cm×厚1cm

■使用例

- ①寝ている方を側臥にして、移乗ボード“のせかえくん”を敷きこみます。
- ②ストレッチャー等をベッドに横付けし、ベッドの高さを調整し、ロックします。
- ③移乗ボード“のせかえくん”の取っ手2ヶ所をもちます。
- ④取っ手を引き寄せ、ストレッチャー等に移乗させます。



■材質：防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム

レンタル料金	ご利用者負担額
円/月	1割負担 円/月
	2割負担 円/月

- ベッドからの移乗時に抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけで楽に簡単に安全に移乗できます。
- 看護・介護する方の腰痛を防止し、負担を軽減します。
- 表面には防水加工布、裏面には特殊加工布を使用。

介護保険
について

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行器

移動用
リフト

徘徊
感知機器

体位
変換器

歩行
補助つえ

手すり

自動排泄
処理装置

特定福祉
用具販売